


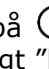




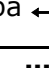





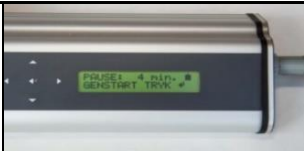

Titel: BRUGERMANUAL - QUICK GUIDE Re5 Neuro Treatment System		Dokument Nr.: MAN-02-003
CE 0123		
Advarsel: Kun den medfølgende strømforsyning må anvendes til Re5-NTS systemet. Batteriet må ikke oplades under behandlingen af en patient. Mobilt kommunikationsudstyr kan påvirke Re5-NTS systemet. For hjælp og rapportering kontakt behandler.		Revision Nr.: 2.0

START AF BEHANDLING

1		Oplad pulsgenerator enheden (independent) i minimum 3 timer (bedst dog 6-8 timer). Oplad altid på samme måde efter 4-5 behandlinger. Hvis enheden ikke er brugt i 7 dage eller mere skal den genoplades i minimum 3 timer (bedst dog 6-8 timer).
2		Placer Re5 Head Applikatoren på patientens hoved Applikatoren skal sidde fast uden at genere eller stramme. Det justeres ved at stramme/løse Velcro pandebåndet.
3		Tænd for Re5 Independent Tryk på  Tænd/Sluk i 2 sek. for at tænde Re5 Independent. Et langt "bip" indikerer, at enheden er startet.
4		Selvtest Re5 Independent udfører automatisk en selvtest, der sikrer, at enheden fungerer korrekt. Den blå lysdiode blinker. Når enheden er klar til brug, lyser lysdioden grønt uden at blinke.
5		Indsæt Re5 SmartCard Chippen på kortet skal vende frem og nedad. SmartCard skal trykkes med fast hånd helt i bund i SmartCard sporet.
6		Isæt Re5 Head Applikatoren i Re5 applikatorstikket i højre side af Re5 Independent. Når applikatorstikket monteres korrekt, lyder et "klik". Dermed er stikket forbundet og låst.
7		Start behandling Tryk på  for at starte behandlingen.
8		Behandling starter Behandlingen starter, når lysdioden blinker blå, hvilket fortsætter igennem hele behandlingen. Restbehandlingstiden kan aflæses i displayet.
9		Afslutning Efter 30 minutter høres et lille bip og lysdioden skifter til grøn. Det betyder, at behandlingen er afsluttet.

Titel: BRUGERMANUAL - QUICK GUIDE Re5 Neuro Treatment System			Dokument Nr.: MAN-02-003
Advarsel: Kun den medfølgende strømforsyning må anvendes til Re5-NTS systemet. Batteriet må ikke oplades under behandlingen af en patient. Mobilt kommunikationsudstyr kan påvirke Re5-NTS systemet. For hjælp og rapportering kontakt behandler.			Revision Nr.: 2.0

PAUSE AF BEHANDLING

1		Pauseaktivering Tryk på Enter (↵) og behandlingen stoppes midlertidigt (pause). Start/Stop lysdioden lyser grønt. Displayet viser inden for hvor mange minutter, behandlingen skal genstartes for ikke at afslutte.
2		Genstart behandling: Tryk på Enter (↵) og behandlingen genstartes. Start/Stop lysdioden blinker blå.

EFTER ENDT BEHANDLING

1		Sluk og træk kortet ud Tryk på ⏻ Tænd/Sluk i 2 sek. for at slukke Re5 Independent. Træk Re5 SmartCard ud. Hvis enheden ikke slukkes efter endt behandling, vil den selv slukke automatisk efter 5 minutter.
2		Afmontering af Re5 Head Applikator Afmonter applikatorstikket ved at trække stikkraften mod højre (træk <u>ikke</u> i kablet). Rengøring foretages med en klud fugtet med rent vand. Desinfektion foretages med Ethanol 80% eksempelvis "WipeClean Ethanol Disinfection 80%" der kan leveres af Plum Pack. Der tilstræbes en indvirkningstid på 2 min.

MULTIFUNKTIONSLYSDIODEN

Multifunktionslysdioden indikerer med forskellige farver, blinkende eller fast lys, om systemet foretager selvtest, behandler, holder pause eller er i fejltilstand.

Blåt blink	Selvtest eller behandling er i gang
Grønt Lys	OK for start med selvtest, for batteri, Re5 SmartCard, Applikator, pause i behandling, behandling gennemført
Grønt blink	Check funktion (se display)
Rød blink	Fejlfunktion eller lav batteristatus

STRØMFORSYNING

Strømforsyning som følger med Re5 Independent, er godkendt til anvendelse med medicinsk udstyr, på hospitaler, klinikker samt til hjemmebrug.

